


Guia de Medidas


Instruções:

- 1 Imprima este arquivo Adobe PDF a 100% na sua impressora. Use a precisão da impressão verifique à direita para garantir a impressão no tamanho adequado.
- 2 Dobre a parte inferior desta página a linha tracejada.
- 3 Corte ao longo da linha pontilhada ao redor do medidor de encaixe.
- 4 Coloque o medidor de encaixe no nariz como mostrado na figura abaixo.
- 5 Determine o tamanho apropriado, em que área o nariz chega.
(S - Pequeno, M - Médio ou L - Grande)

Verificação da precisão de impressão

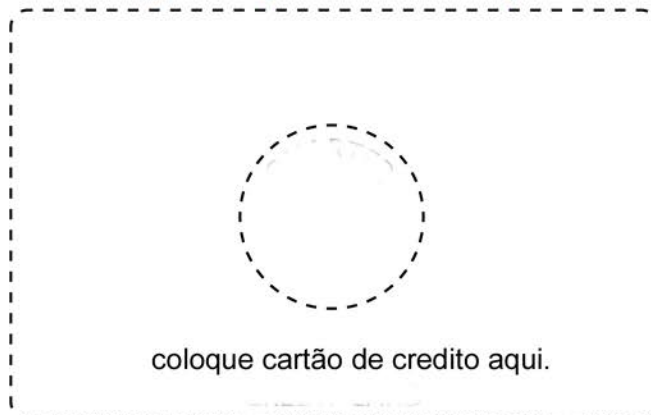

A Philips Respironics sempre recomenda consultoria um médico ou um terapeuta do sono registrado ao instalar um máscara para garantir um dimensionamento e ajuste adequados.

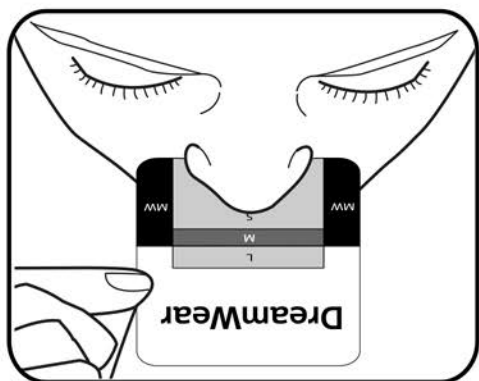

DOBRAR ao longo da linha tracejada

Medidor de montagem CORTE ao longo da linha pontilhada

