

GUIA DE TAMANHO

- 1 Imprima o guia de tamanho em "Tamanho real" ou "100%".

Para conferir se a impressão está correta verifique se o quadrado mede 2,5 cm:

2,5 cm


- 2 Após confirmar se o guia foi impresso corretamente, recorte-o de acordo com as indicações.

- 3 Experimente cada molde de almofada no nariz e escolha o menor tamanho de almofada que não fique obstruindo as laterais do nariz ou os olhos.



Verifique na imagem que o paciente usa o tamanho Médio (M).

Máscara nasal Ventilada ResMed

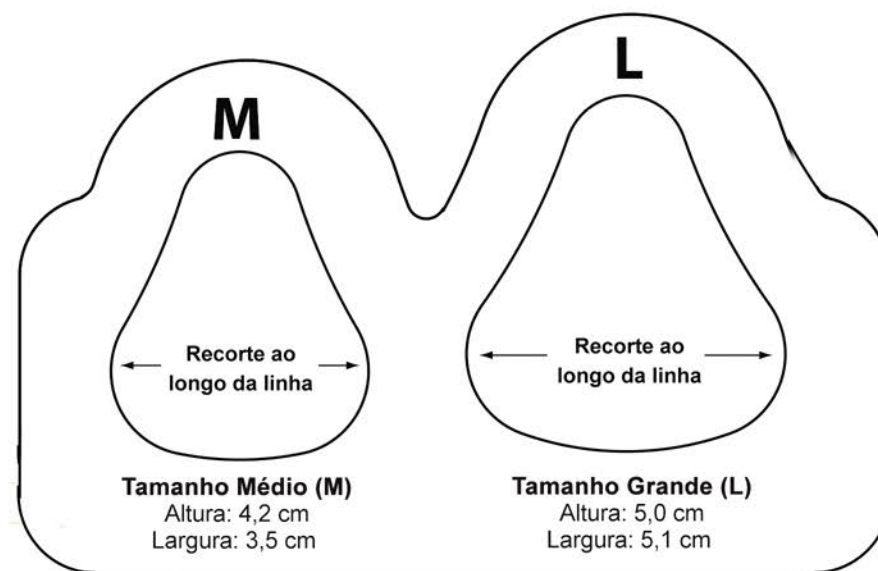

BIANCO AZURE

equipamentos respiratórios