

Amara View


máscara facial

## Instruções



Ajuste as configurações da impressora para imprimir em "Tamanho Real" ou "100%". A opção "Ajustar" deve ficar desmarcada. Confirme a impressão ao lado:

- 1 Dobre o final da folha na linha pontilhada;
- 2 Recorte o Guia de Tamanho na linha pontilhada;
- 3 Posicione o Guia de Tamanho na base do nariz, conforme demonstrado na figura abaixo:

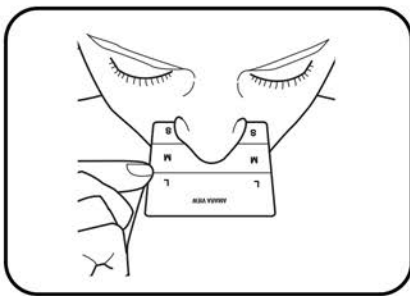


- 4 Determine o tamanho apropriado pela área tocada pelo nariz:  
S = Pequeno | M = Médio | L = Grande

## Confirme a impressão



## Guia de tamanho

Recorte na linha pontilhada

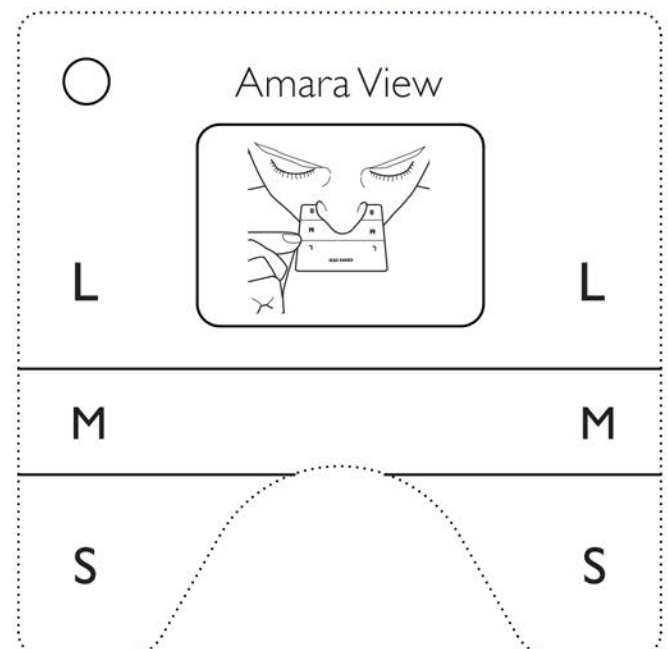

Dobre a linha pontilhada