


- 1 Imprima o guia de tamanho em "Tamanho real" ou "100%".

Para conferir se a impressão está correta verifique se o quadrado mede 2,5 cm:

2,5 cm


- 2 Após confirmar se o guia foi impresso corretamente, recorte-o de acordo com as indicações

- 3 Mantenha a boca naturalmente aberta e experimente cada tamanho para definir o mais adequado.

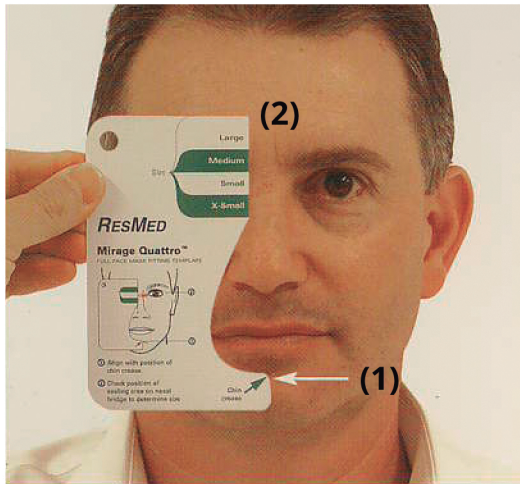

**DICA:** (1) A base da almofada deve ficar no meio do queixo (cerca de 1 cm abaixo do lábio inferior). (2) A parte superior da almofada deve ficar na ponte nasal alinhada com a altura dos olhos. Se a medida ficar entre dois tamanhos, escolha o menor.

## Máscara Facial Mirage Quattro - ResMed

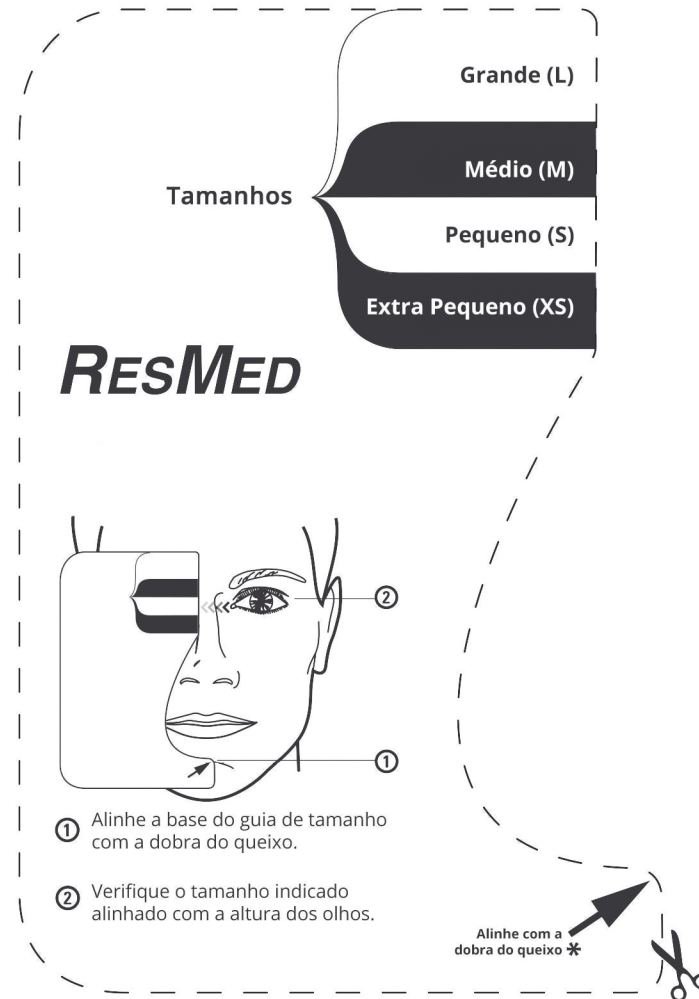

- 1 Alinhe a base do guia de tamanho com a dobra do queixo.
- 2 Verifique o tamanho indicado alinhado com a altura dos olhos.

Alinhe com a dobra do queixo \*